

O₂ OPTIX

Indikationen:

- Für lange tägliche Tragezeiten und gelegentlich über Nacht tragen
- CE-Zulassung für verlängertes Tragen bis zu 6 Nächten
- Sphärische Fehlsichtigkeiten von -11.50 dpt bis +5.50 dpt (Brillenkorrektur in HSA = 14)
- Für Träger, die einen sehr hohen Tragekomfort fordern
- Bei Handhabungsproblemen mit farblosen Kontaktlinsen
- Bei Sauerstoffmangelerscheinungen mit anderen Kontaktlinsen
- Bei ungünstigen Tragebedingungen (Klimaanlage, Bildschirmarbeit ...)
- Bei Ablagerungsproblemen
- Bei Dehydratationsproblemen (Abtrocknung der Linse) mit anderen Kontaktlinsen
- Optimal für „Neueinsteiger“ und „Wiedereinsteiger“
- bei hohen Sehansprüchen

Material:

Lotrafilcon B

Fluor-Silikon-Hydrogel

Wassergehalt: 33 %

Materialklasse: nicht ionisch (FDA, Gruppe I)

Dk-Wert: 110 (Fatt corr. 35 °C)

Dk/t-Wert: 138 (-3.00 dpt, Fatt corr. 35 °C)

Optimales Dk/t-Profil (Dk/t average)

Handling:

Gravur:

CIBA X6 = Basiskurve 8,60

Tint: hellblau (Rand zu Rand)

Geometrie:

Profiloptimiertes asphärisches Design

(= gleichmäßig dünnes, asphärisches Linsenprofil)


Vorder- und Rückfläche: Asphärisches Design

Mittendicke bei -3.00 dpt: 0,08 mm

Herstellverfahren:

Full mold mit patentierter Oberflächenmodifikation

NUTZUNGSDAUER
4 WOCHEN

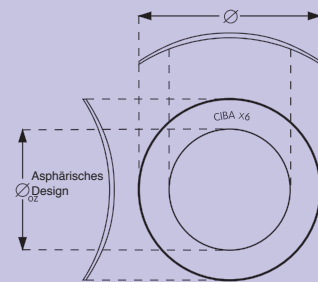

Lieferprogramm:

Art.-Typ	Verpackungseinheit	Basiskurve mm	Wirkungen dpt	Ø mm
OS6	6er Box	8,60	plan bis -8.00 (Abst. 0.25) -8.00 bis -10.00 (Abst. 0.50) +0.25 bis +6.00 (Abst. 0.25)	14,20
OST*				

* Einzelne Anpasslinsen in allen Stärken erhältlich.

Anpassempfehlung:

Basiskurve: 8,60 mm, KL-Ø: 14,20 mm

KL-Wirkung: beste sph. Brillenkorrektur (in HSA = 0)

Aufgrund des flachen asphärischen Designs der O₂OPTIX ist die verbreitete Faustformel (HH-Radien +1,00 bis +1,50 mm) nur bedingt gültig. Das asphärische Design ermöglicht eine breite Abdeckung der Linsenträger im Indikationsbereich.

Zentrierung:

Die O₂OPTIX zeigt durch ihre Materialstabilität und den Durchmesser 14,20 mm ein sehr gutes Zentrierverhalten. Ein zentrischer Sitz sollte in allen Blickbewegungen zu sehen sein.

Bewegung:

Die Minimalanforderung ist eine sichtbare Bewegung bei Lidschlägen.

Eine gut bewegliche Kontaktlinse sichert den erforderlichen Tränen austausch auch über Nacht.

Pflegeempfehlung:

SOLOCARE AQUA, alternativ AOSEPT PLUS oder BLUE VISION



Austausch-Kontaktlinsen

Ku 1204

**CIBA
Vision**
A Novartis Company